

SENCOR SCA-BA02 alkomeeter

Kasutusjuhend


Lugege käesolevat juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja säilitage tulevikus lugemiseks.

Ohutus

Alkomeetri kasutamine vahetult või 15 minuti jooksul pärast alkoholarvitamist võib kahjustada sensorit ja muuta edasised mõõtmistulemused ebatäpseteks. Seadme garantii ei laiene sellisest kasutamisest tulenenud kahjudele.

- Ärge teostage mõõtmist tugevas tuules ega suletud ruumis, mis on täidetud sigaretsuitsu või alkoholiaurudega.
- Kui ekraanile ilmub patareide tühjenemise märguanne, pange seadmesse uued patareid.
- Ärge puhuge puhumistorusse suitsu, vedelikke ega toiduaineid.
- Kasutage seadet temperatuurivahemikus +10....+40C.
- Alkoholitase hingeõhus sõltub paljudest teguritest. Juba mõne minuti möödudes esimesest mõõtmisest võib teise mõõtmise tulemus esialgsest erineda.
- Seadme kasutamisest saadav info on ainult informatiivne. Soovitame mitte kasutada seadet, langetamaks otsust, kas isik on võimeline vastutust nõudvaid ülesandeid täitma.
- Ärge asuge ise ega lubage kellelgi teisel asuda mootorsõidukit juhtima, olles tarvitanud alkoholi. Pärast alkoholi tarvitamist kasutage mingit muud transpordiliiki, kui puudub kaine autojuht.
- Tootja ega müüja pole vastutavad käesoleva seadme ebaõigest kasutamisest tulenenud kahjude eest.

ÄRGE TARVITAGE ALKOHOLI, KUI TEIL ON VAJA MOOTORSÕIDUKIT JUHTIDA!

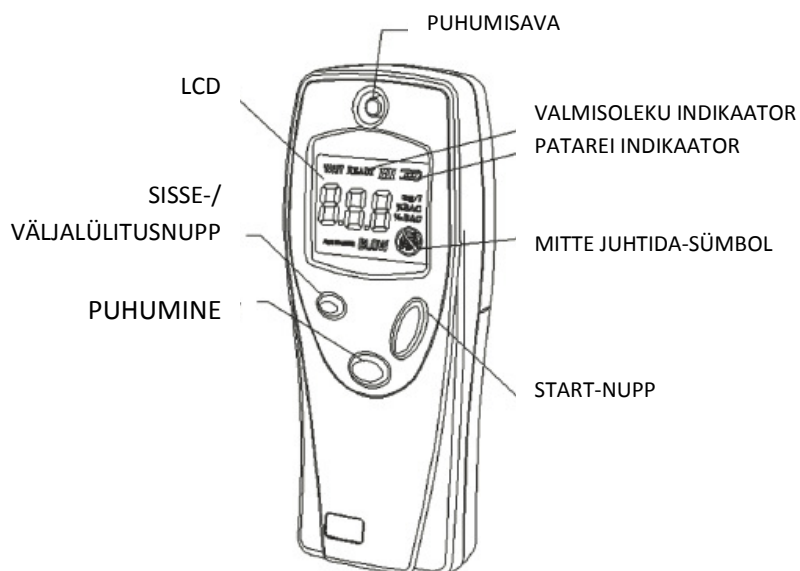

Seadme osad

Patareide paigaldus

Eemaldage patareidõõnsuse kate. Sisestage 3 AAA leelispatareid õiget polaarsust järgides patareidõõnsusse. Pange patareidõõnsuse kate oma koha peale tagasi. Pärast patareide vahetust käivitub isepuhastusrežiim AUTO CLEANING automaatselt, ekraan hakkab protsessi lõpuni jäävat aega allapoole loendama. Automaatse puhastuse protsessi võib katkestada ON/OFF nupu vajutusega. Seadet saab kasutada siis, kui protseduur on lõpule jõudnud.

Kasutamine

Tähtis on, et testitav loputaks oma suu enne seadme kasutamist puhta veega. Ärge suitsetage ega tarvitage alkoholi umbes 5 minutit enne testimist. Vajutage seadme START nuppu. Aktiveeritakse eelsoojendusandur. Ekraanil vilgub märguanne WAIT (oodake) umbes üheksa sekundi vältel. Seejärel hakkavad ekraanil kordamööda vilkuma märguanded 'PH' ja 'Sta' ja ekraan alustab tagasiloendust. Sisestage kõrre või puhumistoru ots vastavasse avausse ekraani kohal.

OLULINE: Oodake eelsoojendusfaasi lõppemiseni.

Ekraanile ilmub teade READY kohe pärast eelsoojendusfaasi lõppu, kostab ka helisignaal. Seade on nüüd testimiseks valmis. Vajutage ja hoidke vajutatuna nuppu BLOW. Ekraanil süttib märguanne Blow ja samal ajal tuleb testitaval isikul puhuda torusse. Puhumine peab olema pidev ja kestma umbes 6 sekundit, kuni kostab helisignaal. Ekraanile ilmub hingeõhust mõõdetud alkoholitase – vaadake järgnevat tabelit.

Mõõdetud tasemete märguanded

Ohutu tase	Mõõdetud alkoholitase, mis jääb alla 0,1‰, kuvatakse ekraanil märguandena 0,00‰.
Madal tase	Kui alkoholitase on üle 0,01‰, aga alla hoiatava taseme, siis kuvatakse alkoholisisaldus ekraanil numbritena
Hoiatav tase	Mõõdetud alkoholitase on võrdne või ületanud lubatava taseme. Kõlab helisignaal ja ekraanil hakkab vilkuma märguanne NO DRIVING 25 korda umbes 10 sekundi vältel. Kuvatakse mõõdetud tase numbrites ja hoiatusmärguanne jääb ekraanile, ekraani taustvalguse värv muutub punaseks. Kui mõõdetulemus ületab 1,5 ‰, ilmub ekraanile juhtimist keelav märguanne ja numbrinäidu asemele teade HI (ülikõrge), mis vilgub 25 korda (10 sekundi jooksul). Helisignaali peatamiseks vajutage START nuppu. AUTOJUHTIMINE ON KEELATUD, KUI MADALA TASEME HOIATUS ON ÜLETATUD.

Märkused

Viige regulaarselt läbi automaatse puhastuse protseduur, ka siis, kui te pole seadet kasutanud kahe nädala vältel. Protseuur käivitub, kui võtate seadmest patareid välja, panete need sisse tagasi ja lülitate seadme sisse. Vilkuma hakkab automaatse puhastuse märguanne AUTO CLEANING. Protsessi kestus on 5 minutit.

Automaatse puhastuse protsessi saate peatada sisse-väljalülitusnupu vajutusega.

Kui olete seadmega 4 järjestikust testi teinud, laske seadmel 2 minutit puhata.

Kui ekraanile tekib märguanne Err kauemaks kui 5 sekundiks, võib see anda märku ebaõigest kasutamisest: nuppu BLOW ei vajutatud ega hoitud testi tegemise ajal all või testi ei alustatud 5 sekundi jooksul valmisolekumärguande ilmumisest alates.

Kui te seadet ei kasuta, säilitage seda kuivas kohas.

Kui patareide tühjenemise märguanne vilkuma hakkab, vahetage patareid.

Tehnilised andmed

Mõõtevahemik	0,1-1,5 ‰
Patareid	3 x 1,5V AAA leelispatareid
Ekraan	Digitaalne LCD ekraan kahevärvilise taustvalgustusega
Mõõtühikud	‰
Automaatne väljalülitamine	2 minutit
Testi kestvusaeg	≥ 6 sekundit
Testi ettevalmistusaeg	30 sekundit
Mõõtmed (K x L x S)	107 x 45 x 25 mm
Kaal	u. 48 g (ilma patareideta)
Märguande kalibreerimisväärtus	0,2 / 0,3 / 0,5 / 0,8 ‰
Lisavarustus	3 puhumistoru

Pidage meeles, et mõõtmistulemusi võib mõjutada õhusaaste, suits ja erinevad tegurid. Tootja ega müüja ei vastuta seadme kasutamisest tulenevate tagajärgede eest.

Ettevaatust! Kui kasutate alkomeetrit kohe või kuni 15 minuti vältel pärast alkoholitarvitamist, võib see kahjustada seadme andurit ning edaspidised mõõtmed võivad olla ebatäpsed. Sellisest kasutamisest tulenev kahju ei kuulu garantii alla.

KESKKONNAKAITSE



Kui toode on tähistatud ratastel prügikonteinerit kujutava läbikriipsutatud sümboliga, tähendab see, et kasutatud seadet ei või ära visata koos tavaliste olmejäätmetega. Elektri- ja elektroonikaseadmete jaoks eksisteerib eraldi kogumissüsteem. Toote korrektse kõrvaldamisega aitate tagada jäätmete nõuetekohase käitluse, taaskasutuse ja ringlussevõtu ning vältida võimalikke kahjulikke mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele, mida jäätmete vale käitlus vastasel juhul kaasa võiks tuua.

Tootja jätab endale õiguse muudatusteks juhendi tekstis ja toote tehnilistes parameetrites.



Toode on vastavuses EC direktiividega elektromagnetilisest ühilduvusest ja elektriohutusest.